





Guardian Angel™ Rx

GA1000 “安麗莎” 生理訊號監控系統
簡易使用指南

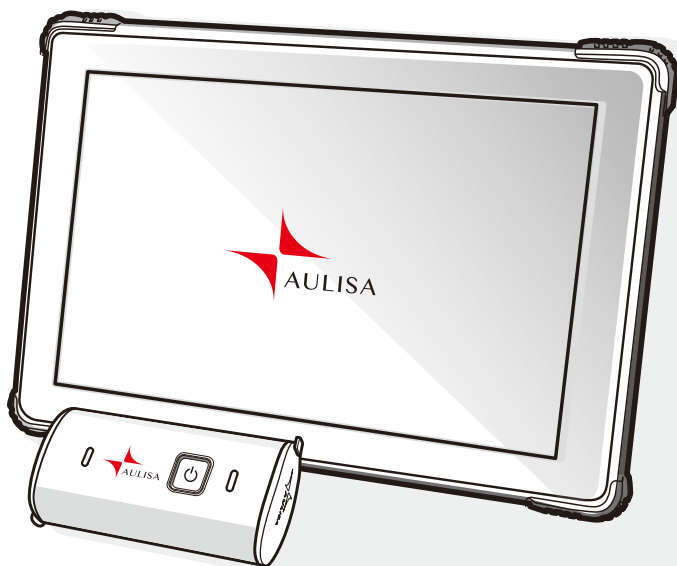

衛部醫器製字第 006228 號

系統架構

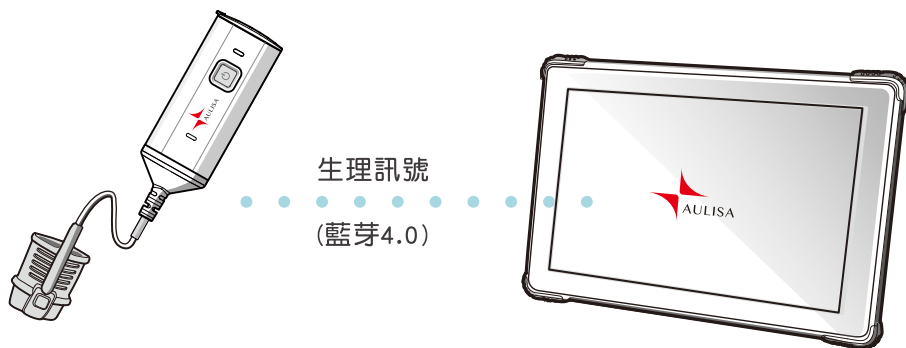


備註: 血氧感測器必須在顯示平板方圓10公尺內使用。


配件




血氧感測器

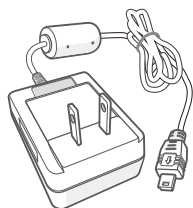

血氧感測器充電器

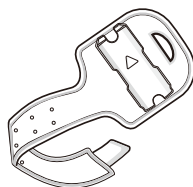


腕帶

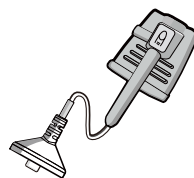


成人血氧探頭*




顯示平板

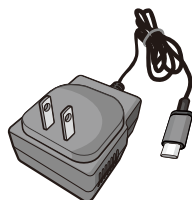

顯示平板充電器

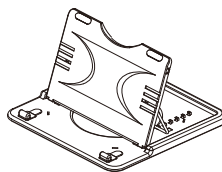

顯示平板支架

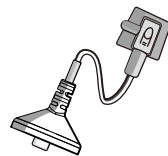


小孩血氧探頭*

* 本產品搭配兩組成人血氧探頭或是兩組小孩血氧探頭


產品介紹

血氧感測器

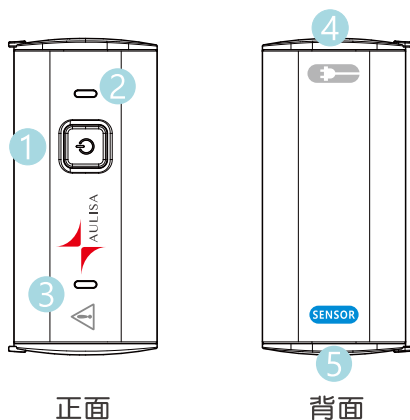

- 1 電源開關
- 2 電源指示燈
- 3 警報指示燈
- 4 充電器插孔
- 5 感測探頭插孔


顯示平板

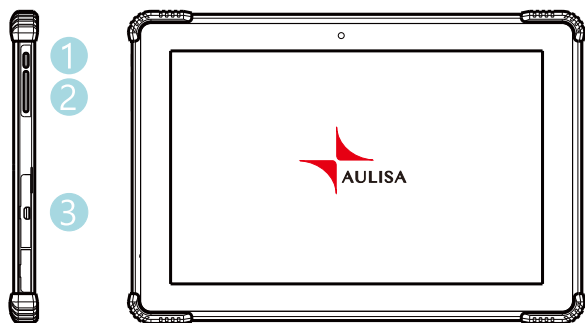

- 1 電源開關
- 2 音量控制鍵
- 3 充電器插孔


系統設定

- 1 血氧感測器使用前，請用充電器將其充電- 約需3小時。將(白色)充電器的 mini-USB端插入血氧感測器 (標示 ) 的插孔。

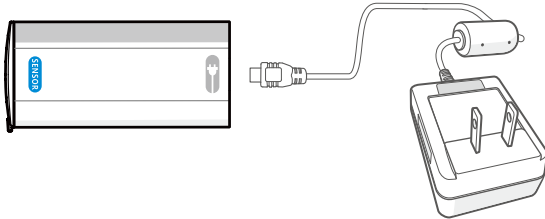

狀態	指示燈號
充電中	藍燈
充電飽	藍燈熄滅

- 2 將顯示平板接上(黑色)充電器為其供電。長按電源開關 (至少3秒) 將其開機。

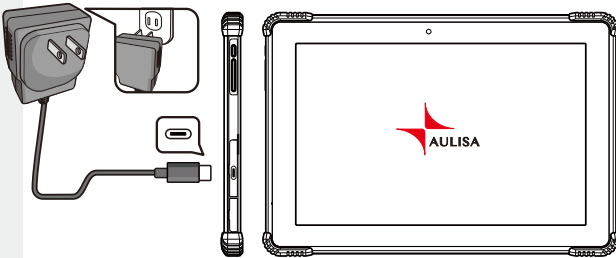


狀態	指示燈號
充電中	紅燈
充電飽	藍燈

- 3 選擇時區。


備註: 選擇時區後主畫面即會出現。

- 4 組裝血氧感測器與血氧探頭。

將血氧探頭的插頭插入血氧感測器 (標示 **SENSOR**) 的插孔。

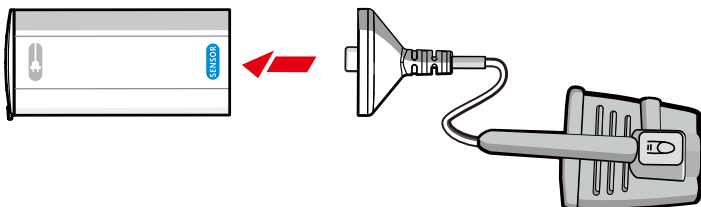

5 穿戴血氧感測模組

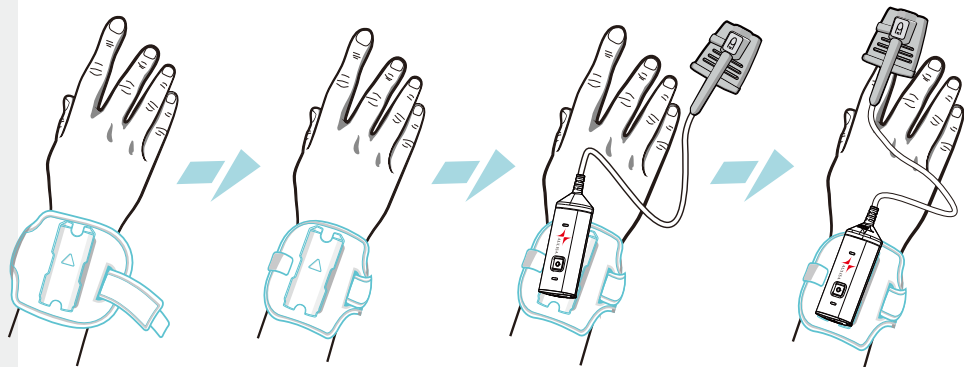

備註: 穿戴腕帶時，上面的箭號須朝向手指端。

備註: 將血氧探頭套上手指，並確保其訊號線安置於手背端。


6 短按電源開關將血氧感測器開機。

狀態	指示燈號
已開機	綠燈

7 配對顯示平板與血氧感測器。


顯示平板會自動掃描並且和血氧感測器進行配對。若未自動配對，點擊顯示平板主畫面上的 **配對**，強制系統進行配對。

備註: 血氧感測器必須在顯示平板方圓10公尺內使用。

顯示平板與血氧感測器配對成功時，藍芽連線狀態圖示  會變藍色。

備註: 當血氧感測器的電源指示燈開始閃爍綠燈時，表示資料已開始進行傳輸。


畫面顯示

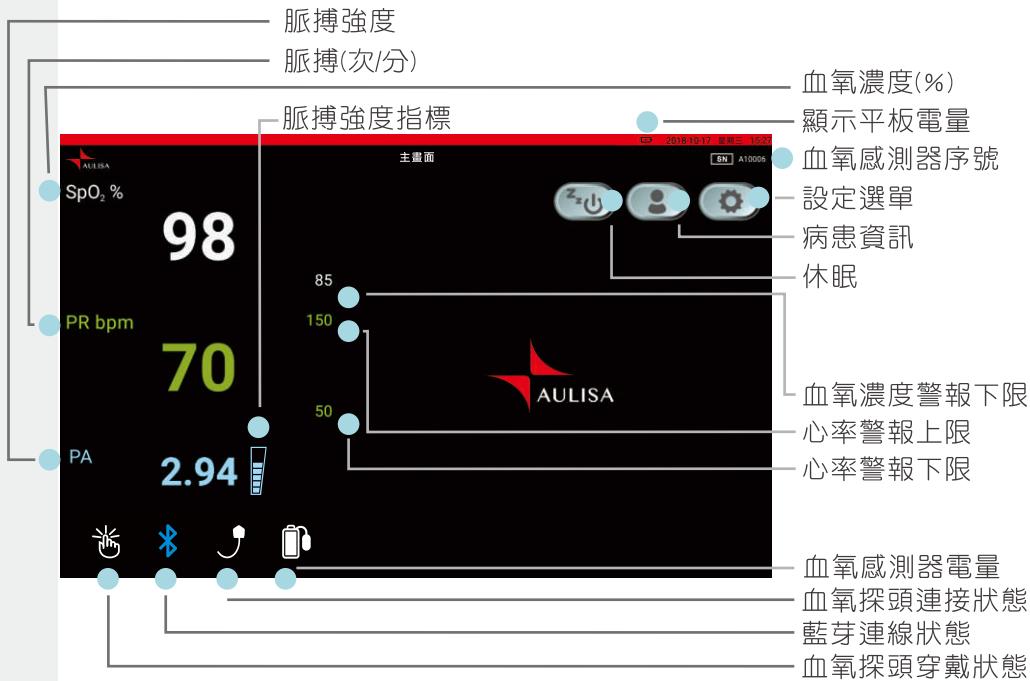

警報系統



警報延遲功能


當數值超過警報設定值，且警報已自動被延遲時，主畫面會顯示一個倒數計時器和 。警報會延遲到計時器倒數到0時才發出。

回復預設警報



高度警報	血氧濃度上限	血氧濃度下限	脈搏上限	脈搏下限
預設值	關	85%	150 BPM	50 BPM

設定警報值

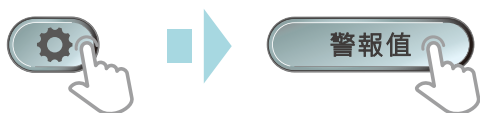

開關警報



調整數值



儲存



客戶服務

如需客戶服務請造訪以下網頁:

www.aulisa.com/CustomerSupport

本簡易使用指南僅供參考。完整的產品資訊、規格、警語和注意事項請參閱中文仿單和原廠使用說明書。



製造廠名稱：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司

製造廠地址：臺北市南港區重陽路218之2號

藥商名稱：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司

藥商地址：臺北市南港區園區街3之2號10樓