

# 客戶服務

如需客戶服務請撥打免付費客服專線: 0809-083-100。

## Guardian Angel<sup>®</sup> Rx Guardian Angel<sup>®</sup> Rx Lite

GA1000 Series/GA2000 Series  
"安麗莎"生理訊號監控系統

### 體溫模組 簡易使用指南



製造業者名稱：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司  
製造業者地址：臺北市南港區重陽路218之2號  
醫療器材商名稱：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司  
醫療器材商地址：臺北市南港區園區街3之2號10樓




「本產品涉及個人資料之蒐集、處理及利用，應遵守個人資料保護法之規範。」

本簡易使用指南僅供參考，完整的產品資訊、規格、警語和注意事項請參閱中文說明書和原廠使用說明書。

## 產品配件




體溫模組主機

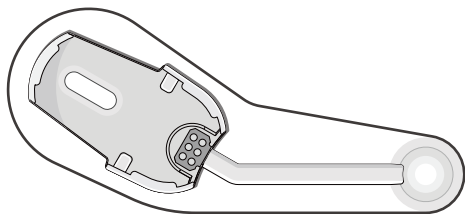

體溫模組貼片


## 產品介紹

### 體溫模組主機

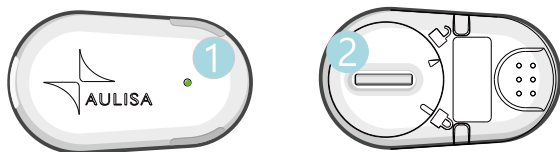

- 1 電源指示燈 ●
- 2 電池槽

### 體溫模組貼片

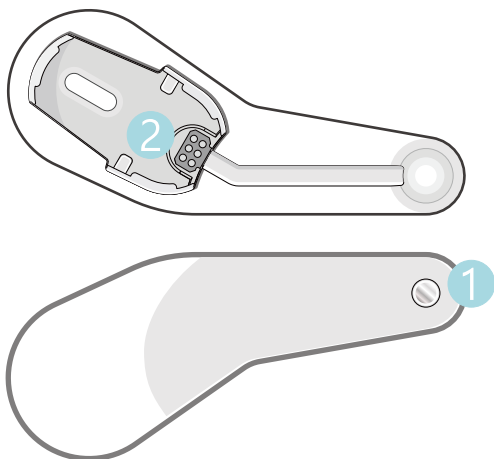


- 1 感測探頭
- 2 電池槽

備註：體溫模組貼片為拋棄式，如欲購買請洽台灣安麗莎客服。


## 產品操作




- 1 組裝體溫模組主機與貼片：將主機放入支架，主機背面六個端點與貼片上端點應同方向。

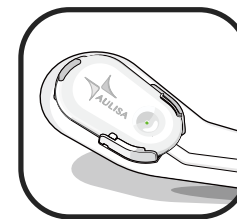


- 2 壓緊固定主機於貼片上。

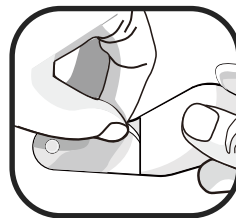


- 3 撕除貼片背面離型紙。

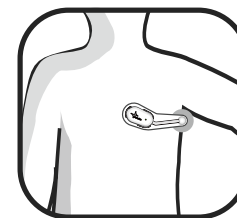

- 4 將感測探頭對準腋下中央貼附，主機則貼附於胸前。

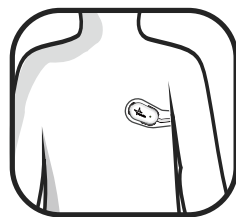

- 5 手臂擺放於身側夾住感測探頭，約12分鐘後可獲取讀值。

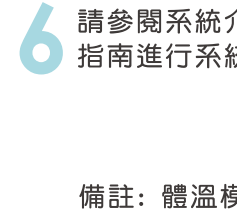


- 6 請參閱系統介面之簡易使用指南進行系統配對及連線。


備註：體溫模組僅量測腋溫。

## 更換電池

系統提示體溫模組低電量時應依下列步驟更換電池。

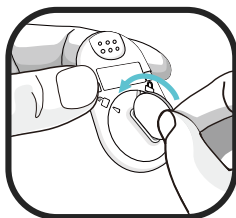

- 1 使用一枚硬幣卡住電池蓋的溝槽，逆時針轉開蓋子並取出電池。

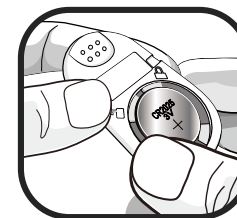

- 2 裝入一枚全新CR2025電池並蓋上電池蓋，順時針轉緊蓋子。

## 警報系統

警報資訊請參閱系統介面之簡易使用指南。